



## **CADEIRA DE TRANSPORTE**

**- Modelo : Ctransp**



**OBRIGADA POR ADQUIRIR NOSSOS PRODUTOS .**

Importado por: Supermedy Importação e Exportação Eireli  
Rua Manoel Jacomo 931 - Jd Angelina CEP 04.835-240  
CNPJ : 08.308.147/0001-55  
SAC: (11) 5012-3167  
Site: [www.supermedy.com.br](http://www.supermedy.com.br)  
Resp .Téc : Jessica Sampaio Caldas – CRF-SP90860  
Registro Anvisa : 80499940059

**Antes de usar este produto, certifique-se de já ter lido com atenção e entendido completamente o manual e como utilizar este produto corretamente. Você pode aprender como este produto funciona e suas observações importantes a partir deste manual.**

## **CONHECENDO O PRODUTO :**

A Cadeira de transporte modelo Ctransp é uma combinação inteligente de design compacto, conforto excepcional e recursos inovadores. Ideal para ambientes com espaço limitado, esta cadeira foi meticulosamente projetada para atender às necessidades de profissionais de saúde e cuidadores, proporcionando facilidade de uso e segurança para o paciente.

- Rodas em PVC para Segurança Silenciosa:

As rodas - em PVC não apenas garantem uma condução silenciosa, reduzindo o desconforto associado ao ruído, mas também oferecem segurança adicional durante o transporte.

-Extremamente Compacta:

Com uma estrutura incrivelmente compacta, e perfeita para ambientes onde o espaço é um recurso valioso. Sua dimensão reduzida facilita a movimentação em corredores estreitos e possibilita o armazenamento conveniente.

- Apoios de Braço Acolchoado e Escamoteável:

Os apoios de braço proporcionam conforto adicional ao paciente durante a transferência e são inteligentemente projetados para serem escamoteáveis, facilitando o acesso e a saída da cadeira.

- Fácil de Transportar e Armazenar:

Com sua incrível capacidade de se adequar a qualquer porta-malas, ideal para deslocamentos e viagens. Sua facilidade de transporte é complementada pelo design compacto, tornando-a uma opção versátil para diferentes cenários.

- Assento e Encosto Acolchoado:

O assento e o encosto são cuidadosamente acolchoados para proporcionar ao paciente conforto máximo durante o uso prolongado.

- Rodízios Frontais 360° para Mobilidade Total:

Os rodízios frontais giratórios 360° permitem uma mobilidade total, facilitando a navegação em ambientes com espaço reduzido e garantindo manobras suaves.

- Freios com Trava nas Rodas Traseiras em PVC:

Os freios nas rodas traseiras, equipados com travas em PVC, garantem estabilidade e segurança, proporcionando controle total durante as transferências.

- Rodas Dianteiras com Olho-de-Gato para Segurança:

As rodas dianteiras apresentam olho-de-gato nos garfos, elevando os padrões de segurança e proporcionando tranquilidade aos cuidadores e profissionais de saúde.



1-Sistema de Freios	5-Roda traseira
2-Trava de segurança da estrutura	6-Manopla
3-Manopla dos freios	7-Encosto para as costas
4-Garfos com Rodas	8-Descanso para os pés

#### MEDIDAS DO PRODUTO :

Dimensão do produto (CxLxA)	70x52x91,2 cm
Peso Suportado	100kg
Altura do Assento ao piso	48,5 cm
Profundidade do assento	42,5 cm
Largura do assento	44,5 cm
Altura do encosto das costas	42 cm
Espaço livre do apoio os pés ao piso	16 cm

#### MONTAGEM :



1

Retire da caixa e abra sua cadeira de transporte.



2

Encaixe a manopla no local indicado.



3

Gire o manipulô para fixar a manopla corretamente.

#### GARANTIA :

- O produto acima identificado possui garantia de 6 meses .
- Os prazos de garantia são contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto novo.
- Esta garantia é dada ao produto acima identificado , exclusivamente contra eventuais vícios defeitos de fabricação que afetam a qualidade ou quantidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao uso regular.