

Guincho

MODELO D5000



dellamed
Home

1. INTRODUÇÃO

Prezado Cliente,

Obrigado por adquirir seu Guincho D5000.

Este Manual de Instruções contém as recomendações necessárias para o uso adequado e seguro do seu guincho.

CONHEÇA A DELLAMED

Criada em 2010, na cidade de Caxias do Sul - RS, a Dellamed é sinônimo de qualidade e inovação. Buscando sempre o bom atendimento, a Dellamed tem como seu principal lema ter a saúde dos clientes em 1º lugar, assim, buscando oferecer os melhores produtos do mercado para poder atender de forma eficiente todos os consumidores finais.

Detentor do Registro: **DELLAMED S.A.**

CNPJ 11.666.105/0001-09 IE 0290519179

Responsável Técnica: Ana Flávia Suda Moreira – CRF/RS 583675

Endereço: Rua Henrique Rech, 312 - Bairro Sanvitto II, Cinquentenário
CEP 95012-613 - Caxias do Sul/RS - Brasil

Fabricante: Suzhou Aoma Machinery Technology Co.,Ltd.

Endereço: No.1222,nijiabang road,luyang,zhoushi town,kunshan city,suzhou,china.

Registro da Anvisa: 80795959003



QUEREMOS OUVIR VOCÊ!
Atendimento ao Consumidor:
0800.604.800 8
assistenciatecnica@dellamed.com.br

2. CONHECENDO SEU PRODUTO

2.1 Principais características:



1	Estrutura Superior
2	Estrutura
3	Base
4	Pistão
5	Rodízios com Freios
6	Rodízios
7	Cesto
8	Manivelas

2.2 Lista de componentes:

Componente	Qtde.	Componente	Qtde.
Parafuso Hexagonal M10x80 mm	1 un.	Tampa da porca M8	1 un.
Parafuso Hexagonal M8x50 mm	1 un.	Arruelas D10	4 un.
Parafuso Hexagonal M8x40 mm	1 un.	Arruelas D8	2 un.
Contraporca de Nylon M10	1 un.	Chave inglesa #13	1 un.
Contraporca de Nylon M8	2 un.	Chave inglesa #16	1 un.
Tampa da porca M10	1 un.	Chave hexagonal #5	1 un.

3. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1º Passo - Abra a embalagem e verifique se o kit de montagem está completo.

Retire o Guincho da embalagem.

2º Passo - Ao iniciar a montagem ative os freios.

Precione o modo OFF nos rodízios traseiros.



3º Passo - Montagem da estrutura na base.

Dica: Alinhe as duas manivelas que realizam a abertura da base do guincho antes de fixar o parafuso.

Acople o parafuso hexagonal M10x80mm (maior) na base e fixe a estrutura superior.



4º Passo - Montagem da parte superior na estrutura.

Adicione a estrutura superior, acople o parafuso hexagonal M8x50mm (médio), É importante que o parafuso esteja completamente alinhado para que as arruelas fiquem bem apertadas.

Dica: Recomendamos ao usuário apoiar a estrutura superior no ombro, de modo que seja possível alinhar os furos e ter maior controle sob a peça.



5º Passo - Montagem do pistão.

Acomple o pistão na base inferior e após rosqueie o anel metálico no sentido horário para fixação a estrutura. Ao acoplar na parte superior do guincho, utilize o Parafuso hexagonal M8x40mm (menor), como ilustrado nas imagens a seguir.



6º Passo - Montagem do cesto.

O cesto possui 4 níveis de altura. Deixe-o adequado para melhor locomoção o seu paciente.



4. UTILIZAÇÃO E MODOS DE OPERAÇÃO

Para que o produto cumpra com a sua finalidade de mobilidade e deslocamento do indivíduo, é importante observar os itens a seguir:

4.1 Regulagem da base:

O ajuste de regulagem da base (abertura dos garfos) deve ser realizada através do pedal. Pressione-o à esquerda para a abrir e, à direita, para fechá-lo.

4.2 Bloqueio e desbloqueio da roda traseira:

As rodas traseiras podem ser travadas para bloquear movimentos, mediante acionamento com o pé para travar e destravar.



ATENÇÃO

Não trave as rodas traseiras durante o movimento de subida e descida do paciente, pois o centro de gravidade do paciente pode ser alterado, necessitando que as rodas traseiras estejam livres. O travamento favorece o risco de tombamento.

4.3 Movimentando o paciente:

Acomode o paciente no cesto de movimentação. Mantenha o braço de elevação do guincho e o corpo do paciente na vertical. Certifique-se sempre de que a operação de elevação do paciente esteja correta.

ATENÇÃO

Qualquer desequilíbrio ou instabilidade em subidas ou descidas pode ocasionar em risco de queda. Não agite/balance, para nenhum dos lados, quando for transferir o indivíduo nestas ocasiões, preservando sua segurança.

5. ASPECTOS DE SEGURANÇA

Consideramos que o fator de segurança é primordial. Diante disso, segue abaixo alguns aspectos que consideramos relevantes e que devem ser observadas antes do uso deste produto:

- a) Pacientes com comportamentos cognitivos variáveis e/ou instáveis;
- b) Pacientes que são imprevisíveis e poucos cooperantes;
- c) Pacientes com limitações clínicas, por exemplo: com uso de bolsas de colostomia, drenos, intubação...).
- d) Ambiente de acesso a áreas de trabalho com espaço limitado, dificultando a manobra do equipamento.
- e) Corredores muito estreitos, com tapetes, rampas ou mudanças de nível de pisos, obstáculos, pisos escorregadios, pouca iluminação, mobiliário inadequado.

ATENÇÃO

A segurança do indivíduo está diretamente ligada à capacidade de carga do equipamento. Antes de operá-lo, o operador deve verificar essa restrição para evitar acidentes graves. É fundamental entender claramente as instruções antes de montar ou usar o equipamento.

6. DADOS TÉCNICOS

Peso do produto	44,5 kg
Largura (mín. - máx)	660 - 1240 mm
Altura (mín. - máx)	1430 - 1950 mm
Comprimento total	1213 mm
Peso máximo suportado	180 kg
Composição	Aço carbono/pintura epóxi - EVA - Nylon

7. TERMO DE GARANTIA

1 – CONDIÇÕES E PRAZO DE GARANTIA

- a) O produto acima identificado possui garantia legal de 03 (três) meses para todos os seus componentes. Encerrado este prazo legal, a Dellamed oferece garantia contratual adicional de:
 - 09 (nove) meses de estrutura - totalizando 12 (doze) meses de garantia.
 - 03 (tres) meses demais componentes - totalizando 06 (seis) meses de garantia.
- b) Os prazos de garantia são contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto

novo.

c) Esta garantia é dada ao produto acima identificado, exclusivamente, contra eventuais vícios/defeitos de fabricação, que afetem a qualidade ou quantidade e tornem o produto impróprio ou inadequado ao uso regular.

d) Para comprovação desse prazo e requerimento da garantia, o consumidor deverá apresentar a nota fiscal de compra do produto, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data da compra, bem como fotografia e/ou vídeo da irregularidade apresentada.

e) A substituição e/ou reparo de peças e componentes será priorizada, conforme Art. 18, caput e §1º do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a decisão será tomada segundo critérios técnicos avaliados pelo setor de Assistência Técnica da Dellamed.

2 - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

a) A garantia do produto é condicionada a análise da irregularidade pela Assistência Técnica da Dellamed ou por Assistência Técnica Autorizada indicada pela mesma.

b) As despesas com transporte/deslocamento, bem como embalagens e qualquer outro risco durante o deslocamento do produto até a Assistência Técnica Autorizada são de responsabilidade do consumidor.

c) A relação atualizada das Assistências Técnicas credenciadas pela Dellamed se encontra disponível no website oficial: <https://www.dellamed.com.br/assistencia-tecnica>, no caso de inexistência de Assistência Técnica credenciada no domicílio do consumidor, aplica-se o contido no item “b” acima informado.

3 – EXCLUSÃO DE COBERTURA DA GARANTIA

Situações e itens que não são cobertos pela garantia:

a) Tentativa ou execução de conserto ou reparo pelo consumidor ou por pessoa, por técnico ou por assistência técnica que não seja credenciada pela Dellamed;

b) Alteração e/ou remoção do número de série/ lote ou da etiqueta de identificação do produto ou modificação das características originais do produto;

c) O desgaste natural do produto;

d) Danos decorrentes de erros na instalação do produto ou na infraestrutura de instalação do produto, caso estejam em desacordo com o Manual de Instalação do produto;

e) Danos decorrentes de erros na instalação do produto ou na infraestrutura de instalação do produto, caso estejam em desacordo com o Manual de Instalação do produto;

f) Ocorrência de batidas, quedas, exposição à temperatura anormal (muito baixa ou muito alta) e/ou utilização de agentes químicos corrosivos;

g) Danos no produto decorrentes de movimentação incorreta e avarias durante o transporte, quando não houver recusa do consumidor no ato do recebimento do produto;

h) Serviços de limpeza, conservação e manutenção preventiva, por serem de responsabilidade do consumidor, não estão cobertos pela garantia. Recomenda-se consultar uma Assistência Técnica Autorizada à Dellamed para orientações sobre a periodicidade da manutenção preventiva do seu produto;

i) Danos decorrentes de falta de manutenção preventiva ou corretiva;

j) Uso indevido do produto em desacordo com as orientações do Manual de Instruções;

k) Quando os defeitos ou desgastes anormais não decorram especificamente de defeitos de fabricação ou decorram de negligência, atos de vandalismo, uso inapropriado ou em desacordo com as recomendações da Dellamed;

l) Equipamento ou parte dele modificado ou danificado pelo uso inadequado;

m) Exposição do produto a condições anormais de ambiente tais como: temperatura excessiva, excesso de umidade sem a devida manutenção após o uso, poeira excessiva, gases, sol direto, chuvas e enchentes;

n) Se parte ou a totalidade dos materiais ficarem depositados em local inapropriado e sujeitos a ação danosa de intempéries ocasionando danos ao produto de forma que se torne impróprio para o uso seguro;

o) Quando ocorrer alteração da estrutura e características de funcionamento;

p) Quando o peso do usuário ultrapassar o peso máximo garantido no Manual de Instruções do produto;

q) Este termo de garantia anula qualquer outra garantia assumida por terceiros, não estando nenhuma empresa ou pessoa autorizada a fazer exceções ou assumir compromissos em nome da Dellamed.



dellamed

Versão 01 – Data 05/06/2023

